



MODALITÀ INDOSSAMENTO MASCHERINE CHIRURGICHE

- LAVARSI LE MANI secondo le indicazioni del ministero della salute
- Verifica che la mascherina non abbia anomalie, buchi o lacerazioni, nel caso sostituiscila

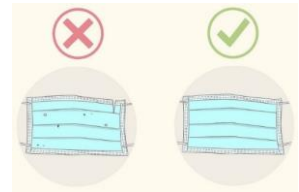

- Orienta la mascherina nella maniera corretta. Il lato bianco è all'interno, il lato colorato va all'esterno, il bordo pieghevole modellabile deve essere rivolto verso l'alto

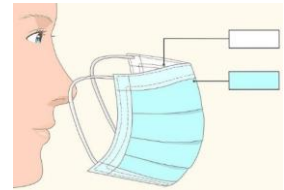

- allaccia la mascherina secondo la tipologia:

- Anelli elastici alle orecchie: prendi la mascherina per gli anelli, mettile uno attorno a un orecchio e aggancia il secondo intorno all'altro orecchio.
- Lacci da annodare: prendi la mascherina per i lacci superiori, portali dietro la testa e legali con un fiocco. (il laccio inferiore si allaccia successivamente)
- Fascette elastiche: posiziona la mascherina davanti al viso, tira la fascetta superiore e sistemala sulla parte superiore della testa, tira l'altra fascetta, falla passare intorno alla testa e sistemala in corrispondenza della nuca




- Una volta posizionata sulla testa e sul viso, usa l'indice e il pollice per stringere la parte pieghevole del bordo superiore attorno al ponte del naso.



- Solo per la mascherina dotata di lacci: Annoda i lacci inferiori.



- Una volta posizionata, regolala per assicurarti che copra il viso e la bocca e che il bordo inferiore arrivi sotto il mento

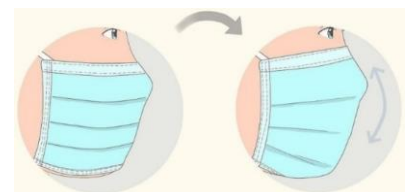

- Prima di togliere la mascherina, lavarsi le mani. Togliere la mascherina toccando esclusivamente gli elastici. Smaltire la mascherina nel rifiuto indifferenziato. LAVARSI NUOVAMENTE LE MANI.

